

Zbrinjavanje



Kad istekne vijek trajanja uređaja MyionZ Pro, preporučujemo da ga ne odlazete u običan otpad već da dostavite osobama ovlaštenima za prikupljanje te vrste otpada. Na taj način će biti propisno zbrinut i recikliran, čime pridonosite zaštiti našeg okoliša.

Jamstvo

Ovaj uređaj se može upotrebljavati samo u svrhe za koje je predviđen. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu neprimjerenom, nepravilnom ili nerazumnom uporabom.

Jamstveni rok se ne produljuje zamjenom uređaja. Jamstveni rok ističe **24 mjeseca nakon datuma kupnje**. Datum kupnje je datum naveden na računu. Dokaz o kupnji je potreban za pružanje usluga u okviru jamstva te je važno da sačuvate račun.

Jamstvo je valjano isključivo u sljedećim slučajevima:

- uređaj ima materijalne ili proizvodne nedostatke; i
- nema znakova loma koji se mogu pripisati kupcu niti dijelova koji nisu originalni.

Jamstvo ne pokriva:

- kvarove uzrokovane nepravilnim korištenjem ili neprikladnim održavanjem i neprikladnom brigom za uređaj
- oštećenja uzrokovana transportom, neprikladnom uporabom, nemarom i/ili neprimjerenim korištenjem
- oštećenja uzrokovana nezgodama kao što su požar, poplava ili drugi vanjski utjecaji; i
- kvarove nastale zbog nepridržavanja primjenjivih mjera sigurnosti i podataka navedenih na tipskoj pločici.

Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava potrošača prema primjenjivim nacionalnim zakonima na snazi niti na prava potrošača u odnosu na trgovca na malo koja proizlaze iz kupoprodajnog ugovora.

U nedostatku primjenjivog nacionalnog zakonodavstva, ovo jamstvo će biti jedino i isključivo sredstvo pravne zaštite te proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu slučajnu ili posljedičnu štetu zbog kršenja bilo kojeg izričitog ili podrazumijevanog jamstva za ovaj proizvod. Odgovornost proizvođača je ograničena i ne smije biti viša od kupovne cijene proizvoda koju je kupac platio.



KUPUJTE ONLINE

www.zepter.hr

MyionZ PRO



UPUTE ZA UPORABU

MyionZ Pro, ION-03

MyionZ Pro je druga generacija prijenosnog, osobnog pročišćivača zraka. MyionZ Pro koristi naprednu tehnologiju ionizacije kako bi vas zaštitio od jako malih čestica veličine atoma poput bakterija, plijesni i virusa koji su često najopasniji za vaše zdravlje. Stalni tok od **20 milijuna/cm3** zdravih negativnih iona koje emitira MyionZ Pro, **veće područje djelovanja** (do 50 cm od emitera) i više od **36 sati kontinuirane uporabe** pružaju vam neprekidnu zaštitu tijekom dana. MyionZ Pro uzrokuje da onečišćujuće tvari u zraku postanu negativno nabijene, tjerajući ih iz vašeg osobnog prostora i stvarajući čist i zdrav zrak za disanje kamo god da idete.

UPOZORENJE

Prije uporabe uređaja MyionZ Pro pažljivo pročitajte sve sigurnosne upute i upute za uporabu i pridržavajte ih se.

- Ne uranjajte uređaj u tekućine i nemojte dopustiti da tekućine uđu u uređaj.
- Ne upotrebljavajte za vrijeme kupanja ili tuširanja.
- Nemojte stavljati niti skladištiti uređaj na mjestu s kojeg može pasti ili s kojeg ga netko može povući u kadu ili sudoper.
- Uređaj se treba držati podalje od izvora topline kao što su izravna sunčeva svjetlost, radijatori, rešetke za odvod topline, štednjaci i drugi uređaji koji proizvode toplinu.
- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s plastičnom vrećicom koja može doći s ovim uređajem niti s uzicom uređaja MyionZ Pro jer mogu predstavljati opasnost od gušenja.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati i djeca ako su starija od 8 godina, ako su pod odgovarajućim nadzorom i ako su dobili upute za sigurno rukovanje uređajem.
- Nikada nemojte rukovati ovim uređajem ako ne radi ispravno, ako vam je ispao ili je oštećen ili vam je pao u vodu.
- Ne pokušavajte rastaviti ili izmijeniti ovaj proizvod.
- Ne koristite tamo gdje se koriste aerosolni raspršivači ili gdje se daje kisik. Ne koristite ovaj uređaj u okruženju bogatom kisikom.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj na mjestima gdje je visoka temperatura (iznad 50°C), držite ga podalje od plinskih štednjaka i pećnica te ga nemojte upotrebljavati u područjima gdje su prisutni zapaljivi uređaji ili uređaji za loženje ili zapaljive pare.
- Ne upotrebljavajte ispod pokrivača ili jastuka.
- Ne dodirujte ionsku ugljičnu četkicu dok uređaj radi. Diranjem ugljične četkice možete kontaminirati površinu i smanjiti stvaranje negativnih iona
- Nemojte blokirati izlaz negativnih iona
- Nemojte spremati uređaj MyionZ Pro u njegovu kutiju kada je napajanje uključeno.


ZDRAVSTVENE MJERE OPREZA

Pacijenti s ugrađenim elektrostimulatorom srca (pacemakerom), djeca mlađa od 8 godina i osobe koje imaju povijest respiratornih problema, mentalno bolesni ili bolesnici sa srčanim ili plućnim bolestima trebaju se posavjetovati s liječnikom prije uporabe ovog proizvoda.

Opis proizvoda



Sadržaj pakiranja

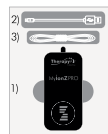

- 1) Glavni uređaj MyionZ Pro
- 2) USB kabel za punjenje
- 3) uzica za oko vrata
- 4) upute za uporabu


Upute za uporabu

1. Prije prve uporabe, napunite uređaj do kraja jer baterija može biti prazna.
2. Uključite uređaj MyionZ Pro pritiskom na gumb on/off 0.5 sekundi. Stalni tok negativnih iona emitirat će se iz emitera negativnih iona stvarajući tako zonu čistog, zdravijeg zraka unutar vašeg područja disanja. Svjetlo LED indikatora treperi zelenom bojom kad je uređaj u načinu rada.
3. Pritisnite gumb on/off 0.5 sekundi opet kako biste isključili uređaj MyionZ Pro.

Punjenje

Crveno LED svjetlo zatrepérit će 5 puta nakon uključivanja uređaja te će preći u stanje mirovanja kada je razina baterije niska.

1. Pobrinite se da je uređaj isključen.
2. Utaknite manji kraj kabela za punjenje u USB utor za punjenje uređaja MyionZ Pro, a veći kraj kabela u bilo koji USB priključak s napajanjem (npr. računalo, zidni punjač, itd.). Svjetlo LED indikatora treptat će crveno za vrijeme punjenja.
3. Kada se uređaj potpuno napuni, crveno LED svjetlo će se ugasiti, a zeleno svjetlo upaliti. Uobičajeno vrijeme punjenja je oko 3 sata.

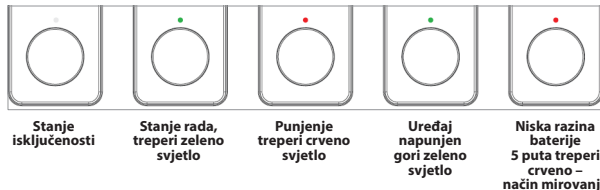

Napomene!

- MyionZ Pro se može upotrebljavati za vrijeme punjenja baterije, ali će to produljiti vrijeme punjenja.
- Koristite adapter za punjenje do maksimalno 2A. Ako se koristi punjač za brzo punjenje jakosti veće od 2A, može doći do oštećenja ili požara u sustavu punjenja.
- Ako se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme, molimo napunite ga barem jednom svaka tri mjeseca.

Čišćenje

Redovno čistite uređaj radi održavanja njegovih radnih performansi.

1. Isključite uređaj.
2. Koristite suhu, mekanu pamučnu tkaninu za čišćenje emitera i tijela uređaja.
3. Ako je površina uređaja onečišćena, obrišite je prvo mokrim ručnikom, a zatim suhim pamučnim ručnikom.

Upozorenja

Ne uranjajte uređaj u vodu!
Ne perite uređaj pod tekućom vodom!
Ne koristite jaka otapala ili kemikalije za čišćenje!

Savjetil

- Učinak uređaja se povećava ako MyionZ Pro nosite oko vrata tako da je MyionZ Pro usmjeren prema vašem licu.
- MyionZ Pro također možete upotrebljavati tako da ga stavite na stol ili u svoj automobil. Napravljen je tako da se može koristiti i bez uzice koja ide oko vrata. Područje djelotvornosti je do 50 cm radijusa od emitera (ugljična četkica).
- Nemojte dopustiti da emiter negativnih iona dodiruje bilo koju čvrstu površinu kada je napajanje uključeno jer to može smanjiti vijek trajanja četkice za proizvodnju negativnih iona.

Specifikacije

Naziv proizvoda	MyionZ Pro	Opis proizvoda	Prijenosni osobni pročišćivač zraka
Šifra artikla proizvoda	ION-03	Distributer	Home Art and Sales Services AG, Sihleggstrasse 23, 8832 Švicarska
Zemlja podrijetla	Koreja	Područje djelotvornosti	Radijus od 50 cm od emitera
Nazivna količina negativnih iona	> 20 milijuna/cm3	Stvaranje ozona (O3)	0.001 ppm
Nazivni napon	DC 5 V / 1 A	Baterija	Litij-ionska baterija 3.7 V / 450 mA
Vrijeme uporabe	36 sati	Vrijeme punjenja	3 sata
Veličina	34(D)x70(V)x16.5(Š)mm	Težina	38 g