

ZeptAir

prijenosna aerosolna terapija



Prijenosni mrežasti raspršivač

ZeptAir je inovativna ultrazvučna raspršujuća mrežica koja je rješenje za učinkovito, prijenosno, priručno liječenje za značajno rastuću populaciju i djece i odraslih s kroničnim respiratornim bolestima kao što su **astma, bronhitis, KOPB i upala pluća**.

Ovaj **ultra učinkovit terapijski sustav** ima visoku brzinu raspršivanja i isporučuje do **0,9 ml** lijeka u minuti, pružajući **kratke i učinkovite** aerosolne tretmane. Brza dostava lijekova i manje trošenja lijekova.



Lungs

Alveoli

ZeptAir Novel Micro mrežni disk vibrira ultrazvučnom brzinom, stvarajući čestice nano aerosola koje odmah dopiru do bronha, umjesto da se zadrže u gornjem dijelu dišnog sustava, i na taj način **izravno utječu na uklanjanje uzroka infekcije**.

Ultra-účinkoviti sustav aerosolne terapije



Novel mrežna tehnologija

stvara izuzetno fine, duboko prodiruće aerosolne čestice s **veličinom manjom od 0,9ml** koji prodiru duboko u pluća.

Niska razina buke

Brzo raspršuje čestice pružajući **tihi i ugodni** tretman.

Veličina dlana

Težak je samo **108 grama** što ga čini prikladnim za nošenje bilo gdje i jednostavnu upotrebu, u bilo koje vrijeme i samo jednom rukom.

Baterija radi za

prikladan tretman čak i u pokretu.

Značajke



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Poklopac | 7 Glavna jedinica |
| 2 Čašica za lijekove | 8 Gumb "Pritisnite" |
| 3 Mlaznica za prskanje | 9 USB priključak za punjenje |
| 4 Gumb za napajanje | 10 Usnik |
| 5 Povećavanje brzine raspršivanja | 11 Maska |
| 6 Smanjivanje brzine raspršivanja | |

Način rada

Uređaj ima dva načina: **kontinuirani rad** i **na zahtjev**.

Odaberite način **"Mikroval"** pritiskom na **tipku za napajanje** tijekom 3s za automatsko podešavanje brzine raspršivanja prema brzini disanja.

Način frekvencije **na zahtjev** omogućuje ručno podešavanje. Prebacujte se između dva načina pritiskom **tipke za napajanje**. Za prilagođenu brzinu raspršivanja odaberite različite brzine pritiskom na **tipke "+"** ili **"-"**.

Šalica za lijekove

Zamjenjiva i odvojiva šalica s tekućom otopinom kapaciteta **10 ml**. Može se koristiti s bilo kojim tekućim otopinama (lijekovima).

Gumb za napajanje

Neposredna terapija pritiskom na gumb.

Usnik i maska

Zepter prijenosni raspršivač mogu koristiti sve dobne skupine s **usnikom** ili **maskom** za maksimalnu praktičnost. Djeca ga mogu lako koristiti, jer se mogu igrati ili čitati knjige dok im se atomizirani lijek dostavlja u pluća.

USB punjenje

Vrijeme punjenja je približno **2 sata**, a **omogućava 60 minuta neprekidne upotrebe** nakon punog punjenja, što je više doza jednim punjenjem.

LED indikatorska svjetla za ispražnjenu bateriju.

Dišite **lako**, dišite **zdravo**

Ako imate **prijenosni** raspršivač **koji se lako koristi** i nudi olakšanje na zahtjev u **najkraćem mogućem roku**, bitno će vam poboljšati život, omogućujući vam uživanje u životu u potpunosti.

Gdje god se nalazili - u školi, na poslu, u avionu, dok uživate u šetnji ili obično u pokretu, **ZeptAir Micro mrežni raspršivač** pomoći će vam davati kontrolu nad svojim životom.



Ovo **malo i kompaktno rješenje** pruža **učinkovit tretman** za cijelu obitelj, **bilo kad i bilo gdje**.



ZeptAir je idealno rješenje za **starije pacijente** koji imaju poteškoća s korištenjem tradicionalnih raspršivača.



Zepter Prijenosni mrežasti raspršivač u kombinaciji s **pod staničnim esencijalnim kompleksom Hyperlight Fluid Fusion**

U kombinaciji sa Subcellular esencijalnim kompleksom Hyperlight Fluid Fusion, Zepter prijenosni raspršivač pruža terapiju koja je korisna za cijelo tijelo, posebno za dišni sustav. Ako se redovito koristi, pomaže u uspostavljanju jakog imunološkog odgovora i neprobojne barijere protiv patogenih infekcija, svih bakterija i virusa.



Saznajte više o najnovijoj Zepterovoj patentiranoj tehnologiji: Hyperlight Subcellular Essential Complex



Besplatni telefon:
0800 1444
e-mail: zepter@zepter.hr
www.zepter.hr

